

採便の方法


準備



楽流カップ裏面の
両面テープの剥離紙を剥が
して下さい。

※剥離紙はトイレに流せません。
お住いの自治体の指示に従っ
て廃棄してください。


設置

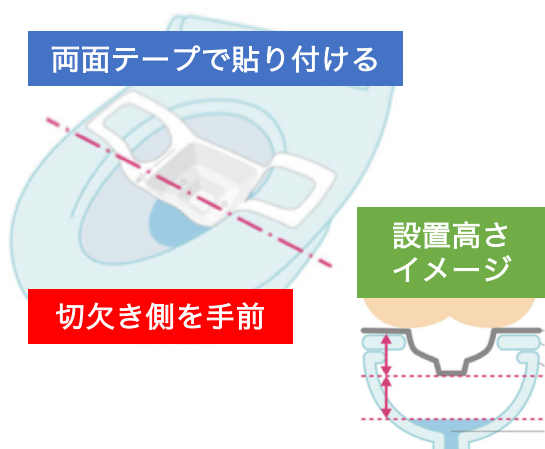

便座または便器の奥側に採
便シートを貼り付けます。

※設置高さの目安は貼り付けた
位置から溜まり水までの距離
の**中間**くらいにしてください。

採便

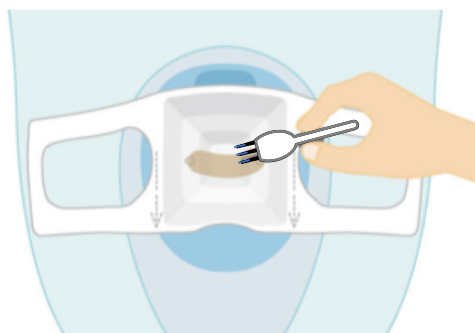

用便後、便を採取して下さい。

流す



便器のふちから取外し、
トイレに流して下さい。

※両面テープが残らないように
ゆっくりと剥がして下さい。
急に剥がすと採便シートの
破れや糊残りの原因となります。